



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP



Το **Pala cre-active** είναι το σύστημα φωτοπολυμερισμού ρευστών μακιγιάζ της Kulzer, το οποίο αποδίδει εξατομικευμένα χαρακτηριστικά οδοντοστοιχιών και βοηθάει στη δημιουργία φυσικών αποκαταστάσεων.

Είναι ένα υλικό για όλες τις χρήσεις και ενδείξεις λόγω του δομικού ιξώδους των ρευστών μακιγιάζ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξατομικεύσει συμβατικές, ψηφιακές και υβριδικές οδοντοστοιχίες.

Το Pala cre-active κυκλοφορεί σε διάφορες αποχρώσεις και υφές και διατίθεται σε σετ ή μεμονωμένα.

Giving a hand to oral health.

# Pala cre-active®

Πριν την εφαρμογή του Pala cre-active, η επιφάνεια της οδοντοστοιχίας αδροποιείται με ένα αδρό διαμάντι ή με αμμοβολή με κόκκους αλουμίνας 50μm και κατόπιν καθαρίζεται με ατμό και στεγνώνεται.



Ένα λεπτό στρώμα από το υλικό Signum® connector εφαρμόζεται στην παρασκευασμένη περιοχή χρησιμοποιώντας ένα πινέλο, ακολουθούμενο από πολυμερισμό μετά από μία περίοδο αναμονής 2 λεπτών. Προχωρήστε στο τελικό φινίρισμα της οδοντοστοιχίας ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες.



Το έτοιμο προς χρήση Pala cre-active εφαρμόζεται άμεσα στο πολυμερισμένο ακρυλικό της οδοντοστοιχίας χρησιμοποιώντας ένα πινέλο ή ένα εργαλείο διαμόρφωσης.

Μετά από την εξατομίκευση με τα επιλεγμένα μακιγιάζ του συστήματος, η οδοντοστοιχία είναι έτοιμη με ένα τελικό πολυμερισμό 180 δευτερολέπτων.

Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μας email στο [info-gr@kulzer-dental.com](mailto:info-gr@kulzer-dental.com) ή καλέστε μας στο +30 210 9631971 και θα σας στείλουμε τον πλήρη οδηγό για τη χρήση του Pala cre-active εντελώς δωρεάν!

## Delivery forms/shades

Pala cre-active (set)		Pala cre-active (refills)	
■ 12x3g Pala cre-active (white, polar, pink, red, maroon, black, gum, gingiva pink, gingiva shade 200, gingiva R50, gingiva light pink, gingiva clear)	66033445	■ white	66033447
1x Pala cre-active Shade Guide,		■ polar	66033448
1x brush, 20x cannula (metal)		■ pink	66033449
5x cannula (plastic)		■ red	66033450
		■ maroon	66033461
		■ black	66033462
		■ gingiva pink	66033463
		■ gingiva shade 200	66033464
		■ gingiva R50	66033465
		■ gingiva light pink	66033466
		■ gingiva clear	66033467
		■ gum	66033468